

URGO ZA KOŽNE PUKOTINE

Tekuća obloga pripremljena za trenutačnu upotrebu, za obradu kožnih pukotina na dlanovima i stopalima.

Što su kožne pukotine?

Kožne pukotine nastaju zbog isušenosti ili zadebljanja kože na površini i mogu biti različito duboke. Uzroci njihova nastanka ponajprije su izloženost toplini, hladnoći i različitim agresivnim deterdžentima ili trljanje.

Kako djeluje Urgo filmogel za kožne pukotine?

Nakon primjene stvara proziran i pokretljiv filmski sloj koji omogućuje povoljne uvjete za obnovu kože:

- ŠTITI OD VANJSKIH ČIMBENIKA
- POPUNJAVA PUKOTINU I SPRJEČAVA NJEZINO PONOVRNO OTVARANJE
- OLAKŠAVA BOL
- UBRZAVA ZACJELJIVANJE
- OTPORAN JE NA VODU

Uputa za upotrebu

Filmogel nanosite lopaticom tako da popunite i prekrijete pukotinu cijelom dužinom. Ostavite nekoliko sekundi da se osuši. Filmogel nanosite od 2 do 3 puta na dan dok pogodeno područje posve ne zacijeli. Nakon upotrebe bočicu dobro zatvorite. Filmski sloj po potrebi možete ukloniti. To učinite tako da na postojeći filmski sloj kapnete jednu kap filmogela i odmah obrišete suhom gazom. Besprijeekornost proizvoda zajamčena je njegovim sastavom; nakon upotrebe lopaticu ne treba čistiti. Preporučuje se potrošiti proizvod tijekom šest mjeseci nakon prvoga otvaranja.

Sastojci

Ulje pšeničnih klica, nitroceluloza, izopropil alkohol, etilacetat, alkohol, hidroksipropilceluloza, ricinusovo ulje.

Kontraindikacije

Ne upotrebljavajte na inficiranim ranama, kod gljivičnih infekcija, opekлина ili krvavih rana. Ne upotrebljavajte na sluznicama (osobito na usnama). Ispitivanja kod trudnica i dojilja nisu provedena, stoga se upotreba proizvoda kod te dvije skupine ne preporučuje.

Upozorenja

Samo za upotrebu na koži. Proizvod mora nanijeti odrasla osoba. Nanosite samo na manje rane. Čuvajte izvan dohvata djece! Ne upotrebljavajte u djece mlađe od tri godine. Tijekom upotrebe proizvoda, odnosno dok se posve ne osuši ne smijete pušiti. Također ne smijete pušiti u blizini otvorene bočice. Nakon primjene možda ćete kratkotrajno osjetiti peckanje. Ako imate nedoumice, posavjetujte se s farmaceutom. Proizvod se ne smije progutati. Spriječite dodir proizvoda s očima. Proizvod nadražuje oči. Proizvod mogu upotrebljavati dijabetičari samo nakon prethodnog savjetovanja s liječnikom.

Čuvanje

Ne upotrebljavajte nakon datuma isteka roka valjanosti navedenog na ambalaži. Čuvajte odvojeno od vatre ili drugih izvora paljenja. Čuvajte na temperaturi do 25 °C.

Kontakt za HR: Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska