

URGO FILMOGEL PROTIV HERPESA

Uputa za uporabu



URGO FILMOGEL protiv herpesa

Indikacije:

Urko filmogel protiv herpesa upotrebljava se za zaštitu i liječenje ozljeda te simptoma herpesa na usnama. Preporučuje se nanošenje čim se pojave prvi znakovi razvoja herpesa (trnci, svrbež, osjećaj peckanja), a zatim nastavak primjene sve dok herpes u potpunosti ne nestane.

Proizvod je u obliku filmogela i tvori diskretni zaštitni film koji je djelotvoran u svim fazama razvoja herpesa te:

- ublažava trnce, svrbež, osjećaj peckanja
- ograničava izbijanje herpesa
- ograničava stvaranje mjeđurića i krasta
- ubrzava zacjeljivanje
- sprječava širenje infekcije

Upute za upotrebu

- Pomoći aplikatoru za jednokratnu upotrebu nanesite tanki sloj filmogela na herpes. Možda ćete privremeno osjetiti trnce ili osjećaj peckanja.
- Ostavite 1 do 2 minute da se osuši i stvori zaštitni sloj.

Vrijeme sušenja ovisi o količini proizvoda koju ste nanijeli.

- Na herpesu će se stvoriti prozirni zaštitni film.
- Postupak ponovite dva do četiri puta na dan, kada zaštitni film više ne prekriva herpes. Nastavite primjenu dok se herpes potpuno ne zacijeli.
- Proizvod možete koristiti od prvih simptoma razvoja herpesa (trnci, svrbež, osjećaj peckanja). To će ograničiti izbijanje herpesa.

Zbog svojeg jedinstvenog i praktičnog načina nanošenja Urko filmogel protiv herpesa omogućuje sigurnu i higijensku upotrebu.

Kontraindikacije

Nemojte koristiti proizvod:

- na herpesu na usnama promjera većeg od 1 cm jer takav herpes zahtijeva liječničku pomoć
- kod bakterijske infekcije i/ili rizika od bakterijske infekcije (impetigo)
- kod smanjenog imunološkog odgovora (zbog kronične bolesti i/ili kemoterapije)
- kod atopijskog ekcema tijekom izbijanja herpesa

Ako ste alergični na bilo koji sastojak proizvoda, nemojte ga koristiti.

Ispitivanja na trudnicama i dojiljama nisu provedena, stoga se ne preporučuje upotreba proizvoda u te dvije skupine.

Upozorenja:

- Samo za vanjsku primjenu na usnama.
- Nakon nanošenja može se pojaviti privremeni osjećaj peckanja.
- Ne koristite kod djece mlađe od 6 godina.
- Nemojte nanositi proizvod u blizini očiju.
- Izbjegavajte kontakt s očima.
- Proizvod nadražuje oči.
- Dobro zatvorite bočicu nakon svake upotrebe.
- Nemojte ponovno koristiti aplikator (jednokratna upotreba).
- Ne gutajte proizvod.
- Tijekom primjene proizvoda ne smijete pušiti sve dok se proizvod potpuno ne osuši. Također ne smijete pušiti u blizini otvorene boćice.
- Proizvod je zapaljiv u tekućem stanju.
- Čuvajte izvan dohvata djece.
- Ostatke filmogela ne treba uklanjati prije novog nanošenja, a ukloniti ga možete tako da ga ponovno nanesete i zatim odmah obrišete vatom.
- Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom:
 - ako vam herpes izbjije više od 6 puta godišnje
 - ako nakon 7 dana upotrebe proizvoda ne primijetite poboljšanje

Čuvanje:

- Ne koristite nakon isteka roka valjanosti navedenog na ambalaži.
- Čuvajte dalje od otvorenog plamena ili izvora paljenja i na temperaturi do 40 °C.

Sastojci:

Derivati celuloze, mineralna kiselina, karboksilna kiselina, biljno ulje, alkohol i voda.



LAKO
ZAPALJIVO



NADRAŽUJE

Proizvođač:

Laboratoires URGO
HEALTHCARE, 42 rue de Longvic
– 21300, Chenôve - France

Distributer:

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1,
Ljubljana

Kontakt za RH:

Medis Adria d.o.o., Kolarova 7,
Zagreb