



URGO FILMOGEL ZA AFTE I RANICE U USTIMA

Tekući film spreman za liječenje afti u ustima (1 do 2 afte promjera manjeg od 1 cm) i manjih ranica u ustima.

Što su afte?

Afta je površinska lezija na usnoj sluznici koja se očituje bolnim ulkusom oštarih rubova i bijelom pozadinom, okruženim svijetlocrvenim obrubom. Podrijetlo nije dobro poznato iako neki čimbenici mogu poticati njihovu pojavu: nasljeđe, neka hrana, fizička trauma (grizenje bukalne sluznice, proteza), neki lijekovi, stres ili hormoni.

Kako djeluje URGO za afte s voćnim okusom?

Nakon primjene stvara se vidljiv, tanak i fleksibilan zaštitni film koji:

- **IZOLIRA** od hrane i sline do 4 sata

- **OLAKŠAVA** bol brzo i trajno
- **POSPJEŠUJE ZACJELJIVANJE**

Upute za uporabu

Obrišite jednu stranu lopatice uz rub bočice. Koristeći vrh lopatice nanesite preostalu količinu kako biste prekrili čitavu aftu ili leziju na usni. Pričekajte 10 sekundi da se osuši pa zatvorite usta: nastat će vidljiv filmski sloj. Ako smatrate da film ne pokriva aftu ili leziju, ponovite postupak. Nanesite na oboljelo mjesto po potrebi do 4 puta na dan, najbolje prije glavnog obroka dok rana posve ne zacijeli (od 3 do 5 dana). Dok je filmski sloj vidljiv, novo nanošenje nije potrebno. Higijena proizvoda zajamčena je njegovim sastavom; nije potrebno očistiti lopaticu nakon uporabe.

Sastav

Derivat celuloze, mineralna kiselina, karboksilne kiseline, alkohol, voda, aroma, sukraloza.

Kontraindikacije

Nemojte upotrebljavati kod većih ranica u ustima (promjera većeg od 1 cm) ili ranica sličnih herpesu (predio s većim brojem sitnih ranica)

koje mora pregledati liječnik. Ne nanosite na zaražene rane, opekotine ili duboke rane (rane koje krvare). Nemojte upotrebljavati proizvod ako ste alergični na derivate salicilne kiseline. Budući da nisu provedena ispitivanja na trudnicama ili dojiljama, ne preporučuje se uporaba proizvoda.

Mjere opreza

Uvijek zatvorite bočicu nakon uporabe. Nakon otvaranja preporučuje se upotrijebiti proizvod u roku od 6 mjeseci. Proizvod nanosite samo na sluznicu usne šupljine. Uporaba proizvoda može prouzročiti prolazan neugodan osjećaj u usnoj šupljini ili blago peckanje. Ne upotrebljavajte kod djece mlađe od 6 godina. Nemojte oljuštiti film nakon što se formira, on će sam nestati. Ako nakon 5 dana liječenja ne primijetite poboljšanje, potražite savjet liječnika. Ako nakon petodnevne uporabe proizvoda ne primijetite poboljšanje, posavjetujte se s liječnikom. Čuvajte izvan dohvata djece. Ne pijte sadržaj bočice. Ne pušite tijekom primjene, prije nego se proizvod potpuno osuši ili

blizu otvorene bočice. Ako ste u dvojbi, potražite savjet ljekarnika.

Ako su rane u ustima nastale nošenjem zubnog aparata ili proteze, moguće je koristiti proizvod ako nije pokriven zubnim aparatićem ili protezom.

Čuvanje

Ne upotrebljavajte nakon datuma isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Čuvajte odvojeno od izvora zapaljenja ili iskri. Čuvajte na temperaturi do 30 °C.

Proizvođač:

Laboratoires Urgo Healthcare,
42 rue de Longvic, 21300 Chenôve,
Francuska

Distributer:

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt za HR:

Medis Adria d.o.o., Kolarova 7,
10 000, Zagreb, Hrvatska